

## Zweckbestimmung

Der Kopfschutzhelm INTEGRAL dient dem Schutz vor Kopf-Verletzungen bei unkontrollierten Fallbewegungen oder Bewegungsabläufen. Er wird auf die beauftragte Masse hin aus hochwertigem Material gefertigt, wobei Material und Herstellung den geltenden Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft genügen (CE).

## Erstes Aufsetzen

Alle gefertigten Kopfschutzhelme durchlaufen im Fertigungsprozess eine strenge Endkontrolle und verlassen die Produktion und den Vertrieb in einwandfreiem Zustand.

Überzeugen Sie sich trotzdem vor dem ersten Anprobieren selbst davon, dass der Kopfschutzhelm in einwandfreiem Zustand ist und den beauftragten Angaben (Maßen und Farbe) entspricht.

Sollte es wider Erwarten Beanstandungen geben, so setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung und leiten Sie uns Ihre Reklamation zu. Unabhängig davon nehmen wir im Übrigen gerne Ihre Anregungen und Wünsche auf und werden versucht sein, diese in die weitere Produktentwicklung einfließen zu lassen.

Alle Erfahrungen, Gefährdungen und Probleme im Zusammenhang mit der Sicherheit und dem Schutz, die in der Anwendung des Produktes gemacht werden bzw. auftreten, werden von uns im Sinne des Medizinprodukte-Beobachtungs- und Meldesystems behandelt und bearbeitet.

Das erste Aufsetzen und Einstellen der Passform sollte am besten durch eine erfahrene Fachkraft erfolgen. Der Helm soll sich an den Kopf anschmiegen und gut sitzen. Berücksichtigen Sie jedoch bitte, dass sich die „starre“ Erstpassform beim Tragen gibt. Der Kopfschutzhelm ist mit verstellbaren Hals- und Nackenriemen versehen, deren Einstellung richtig angepasst werden sollte (diese sollen gut aber nicht zu stramm sitzen). Das gilt auch für den als Zubehör erhältlichen Kinnschutz. Die Schutzfunktion wird dann optimal, wenn der Helm gut anliegt und sitzt.

## Permanente Benutzung

Benutzen Sie den Helm nur für eine Person. Bewahren Sie den Schutzhelm stets griffbereit in der Nähe auf, wenn dieser abgesetzt werden kann.

## Pflege und Lagerung

Der Kopfschutzhelm kann mit milder Neutralseife gereinigt werden. Bitte nicht mit Lösungsmitteln oder aggressiven Reinigern behandeln, da diese das Material verändern und Substanzen enthalten, die die Funktion beeinträchtigen können. Setzen Sie den Kopfschutzhelm keinen zu hohen Temperaturen aus und vermeiden Sie Feucht-Lagerung.

## Vorsichtsmassnahmen und Gegenanzeigen

Der Kopfschutzhelm ist nicht zur Verwendung als Schutzhelm für Fahrrad, Moped, Motorrad oder Sportarten wie z.B. bei Roller-Skates-, Inline-Skates-, Ski-Fahren etc, oder beim Reiten etc geeignet.

**Bei der Verwendung ist zu beachten, dass die Vergurtung des Helms stets so anzulegen ist, dass der Helm sicher und nicht rutschend am Kopf sitzt. Hierbei ist insbesondere bei Kindern und Kleinkindern zu beachten, dass die flexiblen Teile der Vergurtungen (Kinnriemen für Standard-, Clip- oder Klettverschluss) nach erstmaligem Anpassen in der richtigen Passstellung an den endständigen Schnallen durch Vernähen zu fixieren sind.** Zur Gewährleistung einer optimalen Schutzwirkung enthält die Vergurtung keinen, sich bei starker Belastung, selbst öffnenden Verschluss. Das Risiko einer Selbststrangulation ist deshalb prinzipiell nicht auszuschließen und kann nur durch geeignete Patientenbeaufsichtigung minimiert werden.